



Monitor de Presión Arterial de Brazo Extralink Smart Life K-4S, Blanco



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/tensiometros/monitor-de-presion-arterial-de-brazo-extralink-smart-life-k-4s-blanco>

Price: **89,00 zł** gross / 72,36 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMIPJRMMLP

Full product description

Medición simultánea de la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y el pulso

El dispositivo permite la medición simultánea y precisa de tres parámetros sanitarios clave:

El dispositivo permite la medición simultánea y precisa de tres parámetros sanitarios clave:



Presión arterial sistólica



Tensión arterial diastólica



Pulso



Memoria de medición

El aparato está equipado con una memoria para registrar y almacenar los 99 últimos resultados de las mediciones de la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica y el pulso. La capacidad de realizar un seguimiento preciso de los cambios en los parámetros de salud a lo largo del tiempo puede resultar especialmente útil para controlar el progreso del tratamiento o para realizar controles de salud periódicos. Esta función también permite compartir fácilmente los resultados con los profesionales sanitarios durante las visitas médicas.

La memoria interna del tensiómetro puede utilizarse para almacenar los resultados. Con el almacenamiento dual, cada resultado de medición puede almacenarse dos veces: una como resultado actual y otra como último resultado anterior. Así, las últimas 240 mediciones se almacenarán en la memoria del aparato.




Funcionamiento sencillo con un solo botón

El manejo intuitivo con un solo botón hace que el dispositivo sea fácil de usar incluso para quienes no están familiarizados con la tecnología médica. Función de ahorro de energía mediante desconexión automática tras tres minutos de inactividad, lo que favorece el uso prolongado del dispositivo.

Cómo utilizar:

1. Envuelva el manguito alrededor del brazo izquierdo del paciente.
2. Asegúrese de que los dedos encajen entre el manguito y el hombro para asegurar el ajuste correcto, pero no demasiado apretado.
3. El brazalete debe aplicarse de manera uniforme y suave, y su borde inferior debe estar a unos 2 dedos por encima de la curva del codo.
4. Levante su brazo izquierdo con el brazalete hacia arriba, sosteniendo el monitor a la misma altura que su corazón. Esta posición ayudará a proporcionar una medición más precisa de la presión arterial.
5. Después de ajustar el brazalete y el brazo del paciente, presione el botón Start-Stop en el manómetro para comenzar la medición.
6. Después de leer el resultado, apague el indicador de presión arterial y quite el brazalete del brazo del paciente.

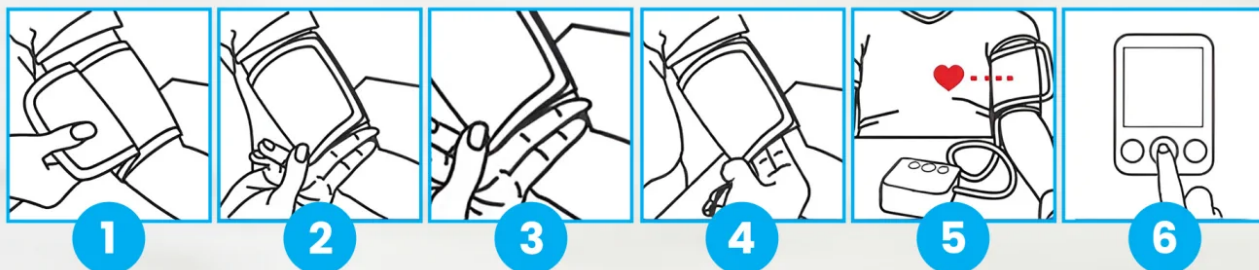

Diseño compacto

Su diseño compacto y su peso ligero hacen que el dispositivo sea fácil de transportar, lo que permite vigilar la salud en cualquier lugar



Ideal para uso doméstico

El diseño compacto y el peso ligero hacen que el dispositivo sea fácil de transportar, lo que le permite controlar su salud en cualquier lugar



Tensiómetro de brazo

Medición simultánea de la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica y el pulso



Medición precisa



Almacenamiento de los últimos 240 resultados




Pantalla LED



Funcionamiento con un solo botón



Apagado automático

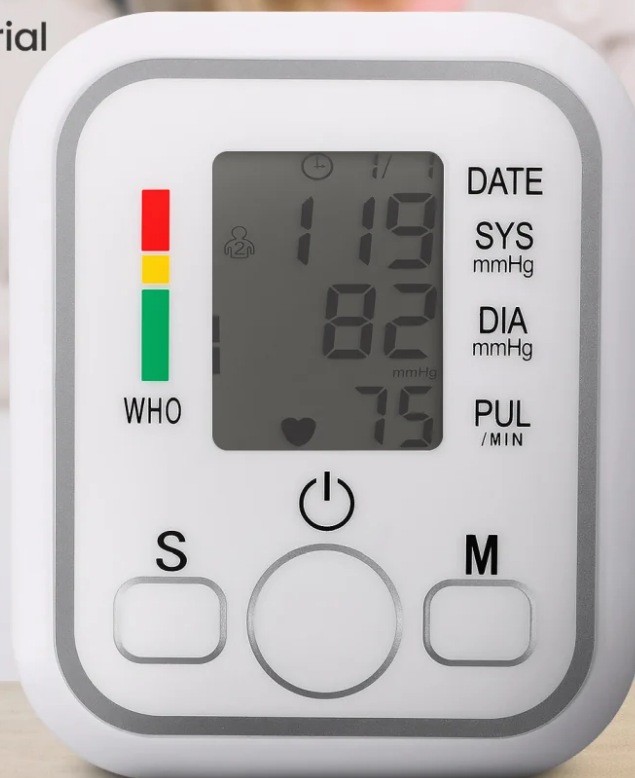

Manejo sencillo con un solo botón



El funcionamiento intuitivo hace que el dispositivo sea fácil de usar incluso para quienes no están familiarizados con la tecnología médica.



Función de ahorro de energía mediante desconexión automática tras tres minutos de inactividad, lo que favorece el uso prolongado del dispositivo.



1 hora antes de la medición

