



Extralink Mini Massage Stick | Elektrostymulator | szyi, karku, mięśni



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/poduszki-masujace/extralink-mini-massage-stick-elektrostymulator-szyi-karku-miesni>

Cena: **16,46 zł** brutto / 13,38 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGMKOGRMJJO

Informacje

Extralink Mini Massage Stick to kompaktowy elektrostymulator mięśni wykorzystujący technologie TENS i EMS, który pomaga łagodzić ból, redukować napięcie i wspierać regenerację po pracy, treningu lub długim siedzeniu. Oferuje 8 trybów pracy i 19 poziomów intensywności, dzięki czemu łatwo dopasować go do własnych potrzeb. Sprawdza się do masażu szyi, pleców, talii, bioder, nóg i brzucha. Ma czytelny ekran, prostą obsługę oraz lekką, przenośną konstrukcję. Wydajny akumulator pozwala na długie użytkowanie, a szybkie ładowanie USB trwa tylko 30 minut. Trwałe, łatwe w czyszczeniu nakładki żelowe można używać wielokrotnie.

Opis produktu

Masażer Extralink Mini

Extralink Mini Massage Stick to kompaktowy **elektrostymulator mięśni** wykorzystujący technologie **TENS oraz EMS** do łagodzenia napięcia i regeneracji organizmu. Urządzenie pomaga w redukcji bólu karku, pleców oraz kończyn, oferując profesjonalny standard terapii w warunkach domowych. Dzięki niewielkim rozmiarom **mobilny masażer** sprawdza się podczas odpoczynku, pracy biurowej czy po treningu.



Kluczowe zalety produktu

- **Technologia TENS i EMS** – skutecznie pomaga w rozluźnianiu spiętych struktur mięśniowych i uśmierzaniu dyskomfortu.
- **Wszechstronne działanie** – konstrukcja umożliwia masaż **szyi, talii, bioder, nóg oraz brzucha**.
- **Personalizacja zabiegu** – wybór spośród **8 trybów pracy** i aż **19 poziomów intensywności** stymulacji.
- **Wydajny akumulator** – bateria **120mAh** pozwala na użytkowanie nawet przez **32 dni** na jednym ładowaniu.
- **Szybkie odnawianie energii** – pełny cykl ładowania przez port **USB** zajmuje zaledwie **30 minut**.
- **Wygoda i higiena** – wytrzymałe nakładki żelowe mogą być używane do **60 razy** i są łatwe w czyszczeniu.



Terapia TENS oraz EMS

Urządzenie wykorzystuje impulsy elektryczne o niskiej częstotliwości w zakresie **1-100Hz**, co przyczynia się do bezpośredniej stymulacji neuronów czuciowych i włókien mięśniowych. **Elektrostymulacja** pomaga w blokowaniu sygnałów bólowych oraz pobudza krążenie krwi, co przyspiesza procesy regeneracyjne. **Extralink Mini Massage Stick** jest trafnym wyborem dla osób borykających się z siedzącym trybem życia lub nadmiernym wysiłkiem fizycznym, dbając o komfort każdego dnia.



Intuicyjne sterowanie

Obsługa masażera została uproszczona do minimum, co sprawia, że jest on dostępny dla każdego użytkownika. Czytelny **ekran cyfrowy** informuje o aktualnie wybranym programie, a przyciski sterujące umożliwiają płynną zmianę parametrów. Wystarczy przymocować **elektrostymulator** do oczyszczonej skóry i wybrać odpowiedni tryb przyciskiem "M". Regulacja mocy za pomocą plusa i minusa pozwala na precyzyjne dopasowanie siły nacisku do progu wrażliwości użytkownika.



Mobilność i wytrzymałość

Obudowa wykonana z połączenia materiałów **ABS, silikonu oraz PU** gwarantuje trwałość przy zachowaniu niskiej wagi. Kompaktowe wymiary **150x70 mm** sprawiają, że masażer mieści się w bagażu podręcznym lub torebce. Urządzenie oferuje swobodę ruchu, ponieważ nie wymaga stałego podłączenia do sieci podczas pracy. Dzięki napięciu **3,7V** i optymalnej mocy wyjściowej **35mA**, sesja masażu jest bezpieczna i efektywna niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz.



Efektywny plan terapii

Dla uzyskania optymalnych rezultatów zdrowotnych zaleca się stosowanie urządzenia przez **10 minut dziennie** w regularnych cyklach trwających minimum tydzień. Systematyczność sprawia, że mięśnie stają się bardziej elastyczne, a chroniczne napięcia ustępują. **Masażer Extralink** automatycznie dba o bezpieczeństwo sesji, działając wyłącznie po prawidłowym przyklepieniu nakładki do ciała. Jest to rozwiązanie, które pomaga w utrzymaniu sprawności fizycznej bez konieczności wizyt u fizjoterapeuty.



Ekonomia i ekologia

Zastosowanie **akumulatora wielokrotnego ładowania** eliminuje potrzebę ciągłego zakupu baterii jednorazowych, co przekłada się na realne oszczędności. Jedno, krótkie 30-minutowe ładowanie przez standardowy **port USB** wystarcza na ponad miesiąc codziennych zabiegów. Nakładki masujące są zaprojektowane z myślą o wielokrotnym kontakcie ze skórą – po utracie przyczepności wystarczy przemyć je wodą, aby przywrócić ich właściwości, co znacznie wydłuża żywotność całego zestawu.



Specyfikacja

Parametr	Szczegóły
Materiał	ABS + silikon + PU
Wymiary	150 x 70 mm
Metody masażu	8 trybów i 19 regulowanych biegów
Częstotliwość	1-100 Hz
Pojemność baterii	120 mAh
Czas ładowania	30 minut
Czas pracy	Do 32 dni (przy 15 min dziennie)
Złącze ładowania	USB
Napięcie pracy	3,7 V
Maksymalna moc	35 mA